

Similasan

Augenlid- Reinigungs- tücher



NEU

Similasan

Augenlid- Reinigungstücher

Zur Behandlung des Augenbereichs bei Erwachsenen und Kindern.



Mit Schwarztee-
Extrakt

Eye Wipes
Sensitive

OPHTHALMISCHE TÜCHER
LINGETTES OPHTALMIQUES
SALVIETTE OFTALMICHE
OFTALMISCHE DEOKJES

Eye Wipes
Sensitive

OPHTHALMISCHE TÜCHER
LINGETTES OPHTALMIQUES
SALVIETTE OFTALMICHE
OFTALMISCHE DEOKJES

**Sterile ophthalmische Einweg-Tücher
zur Behandlung der Augenpartie bei
Erwachsenen und Kindern.**

Anwendungsgebiete

Eine gut gereinigte Augenpartie schenkt den Augen Wohlfühlkomfort. Dabei werden Ablagerungen, Sekrete und Fremdkörper entfernt.

- ✓ Bei **allergischen Augen**: Entfernt Pollen, Staub oder andere Fremdkörper aus den Wimpern.
- ✓ Bei **entzündeten Augen**: Entfernt Ablagerungen und Sekrete, z. B. wenn das Auge am Morgen verklebt ist.
- ✓ Bei **empfindlichen Augen**: Zur Entfernung von Make-up.
- ✓ Bei **trockenen Augen**: Zur Lidrandpflege, z. B. bei einer Funktionsstörung der Meibom'schen Drüse.
- ✓ Vor und nach **augenärztlichen Behandlungen**.

Eye Wipes Sensitive

OPHTHALMISCHE TÜCHER
LINGETTES OPHTALMIQUES
SALVIETTE OFTALMICHE
OFTALMISCHE DEOKJES

Gebrauchsanweisung

Nachdem Sie Ihre Hände sorgfältig gereinigt haben, öffnen Sie den Beutel und ziehen Sie das Tuch heraus. Wenden Sie das Tuch im Bereich des Augenlids an und wischen Sie diesen vorsichtig ab, um eine ausreichende Reinigung, Entfernung von Verschmutzungen, Absonderungen / Sekreten und Fremdkörpern im Augenbereich zu ermöglichen.

Bei besonders hartnäckigen Sekreten oder dem Verschluss eines Tränenkanals ist es ratsam, den geschlossenen Beutel einige Minuten in lauwarmem Wasser (ca. 40 °C) zu erwärmen und das Tuch dann als warme Kompresse zu verwenden, um den Bereich sanft zu massieren.

Andererseits ist es im Falle einer Entzündung ratsam, den Beutel einige Stunden im Kühlschrank abzukühlen und dann das offene Tuch am Auge anzuwenden, wobei es einige Minuten als kalte Kompresse an Ort und Stelle verbleibt.

Nach Gebrauch muss nicht gespült werden.

Zusammensetzung

Weiche Tücher, getränkt in einer Lösung aus: Wasser, Propylenglykol, Cocoylweizen-Aminosäuren, Glycerin, Natriumchlorid, Camellia sinensis (Tee)-Blattextrakt, Natriumcitrat, Zitronensäure.

 Promeia Italia Srl, MIND Viale Decumano, 36, 20157 Milano (MI), Italy
www.promeia.com

Distributor: SANOVA Pharma GesmbH, Haidestraße 4, A-1110 Wien



Dies ist ein Medizinprodukt. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.
Stand der Informationen 07/2023. SIMI_2023_023.


V2.0 PD50E2680

www.similasan.at



NEU

GRATISPROBE

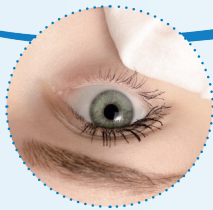

- ✓ Mit Schwarztee-Extrakt
- ✓ Frei von Konservierungsstoffen, Parabenen und Parfüm
- ✓ Einfache Anwendung – auch für unterwegs
- ✓ Kein Spülen nach der Anwendung – nicht fettend
- ✓ Für Kontaktlinsenträger geeignet
- ✓ Für die tägliche Anwendung geeignet
- ✓ Kalt oder warm als Kompresse anwendbar

Die Einweg-Tücher wurden speziell für Personen mit sensibler Haut, Augenlider und Augen entwickelt.
Einfache und schnelle Entfernung von Verschmutzungen und Fremdkörpern mit den sterilen Similasan Augenlid-Reinigungstüchern.

Sanfte Reinigung Ihrer Augenpartie